**Invima** 



## INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Informe de Seguridad asociado a:

NOMBRE DEL REACTIVO DE CARTUCHO DE REACTIVOS FLEX® DE CREATININA

**DIAGNOSTICO IN VITRO** (CREA)

**NO. IDENTIFICACIÓN** IRD-010716

REFERENCIAS DEL REACTIVO CATÁLOGO DF33B, CÓDIGO SMN10872079, Todos los lotes y

lotes futuros

CATALOGO K1033A CODIGO SMN 10872082 Todos los lotes y

lotes futuros

**REGISTRO SANITARIO** INVIMA 2006RD-0000116

**INDICACIONES Y USOS** ESTOS 15 PRODUCTOS SON UTILIZADOS PARA REALIZAR **ESTABLECIDOS** 

PRUEBAS DE QUIMICA SANGUINEA DE MUESTRAS

PROCEDENTES DEL CUERPO HUMANO.

NOMBRE DEL FABRICANTE **DIAGNOSTICS** HEALTHCARE SIEMENS SIEMENS

HEALTHCARE COLOMBIA

**DESCRIPCION DEL PROBLEMA** Sesgo negativo, ocasionando resultados bajos en el rango de

medición analítico (AMR) de la orina. Este inconveniente da como resultado la imposibilidad de alcanzar el límite de cuantificación requerido (5 mg / dl [442 mg / dl]) para las muestras de orina. No obstante, el sesgo observado para las muestras de orina a concentraciones de creatinina menores de 13 mg /dL, no tiene impacto en la interpretación clínica del cálculo de la tasa de filtración glomerular o en la interpretación clínica de las pruebas de laboratorio usando creatinina como un factor de corrección en el cálculo de la albúmina y las proteínas

en orina.

**FUENTE** http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Autres-

> mesures-de-securite/Dimension-et-Dimension-Vista-Creatinine-Siemens-Healthcare-Diagnostics-INC-Information-de-securite

**FECHA DE NOTIFICACION** 01/07/2016







® MINSALUO In√imo



## **RECOMENDACIÓN:**

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá D.C., ó al correo electrónico Reactivovigilancia@invima.gov.co.





